


Шприц «Цито» на раскол (0,25мл) GU-1500-22

Шприц «Цито» на раскол (0,25мл) предназначен для искусственного осеменения коров и телок ректоцервикальным способом семенем в пайетах 0,25мл международного образца.



Основные элементы шприца изготовлены из медицинской нержавеющей стали.

Отличительной особенностью шприца «Цито» является наличие посадочных гнезд под пайету 0,25 мл, которые обеспечивают удержание пайеты точно по центру плунжера, что исключает повреждение пайет в процессе обращения со шприцем. Аналогичным образом сделана конструкция вставок в наших защитных чехлах. Таким образом, пайеты защищены от повреждений с обоих концов в процессе осеменения.

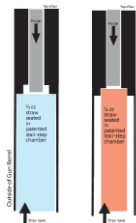

Плунжер шприца сделан из особого сплава и прошел термическую закалку в специальном режиме. Кнопка плунжера закреплена особым образом и выдерживает усилие на отрыв более 45 кг.

Каждый шприц упакован в индивидуальный герметичный пластиковый футляр.

	упаковка	длина шприца	Зажим	характеристики
GU- 1500-22	в пластиковом футляре 1 шт.	44,45 см	на раскол	к защитному чехлу с голубой вставкой



**Высокий уровень качества гарантирует вам
эффективность и удобство в работе!!!**

По всем вопросам обращайтесь:

ООО «Континентал БиоТех» (142143, РФ, Московская обл., г. Подольск, п. Быково, 5-5)

Е-mail: info@continentalbiotech.ru

Тел.: (495) 642-26-37, +7 (926) 519-49-53, +7 (929) 585-31-60



Шприц «Цито» на раскол (0,25 мл) GU- 1500-22

Назначение:

Для осеменения коров и телок семенем в пайетах 0,25 мл. ректо-цервикальным способом.

Меры предосторожности:

Держите вне досягаемости детей. Не предназначен для инъекций.

Порядок применения:

- а) Возьмите шприц в руку;
 - б) Выдвиньте плунжер на длину пайеты;
 - в) Вставьте в шприц поршнем во внутрь пайету объемом 0,25мл с семенем быка, размороженным в соответствии с инструкцией по ИО или рекомендацией предприятия-изготовителя семени. Пайета должна быть обрезана со стороны запайки Цито-обрезчиком или другим предназначенным для обрезки пайет инструментом;
 - г) Наденьте до упора на шприц защитный чехол с голубой вставкой и зафиксируйте его;
 - д) При необходимости оденьте сверху санитарный чехольчик «Коверол»;
 - ж) Шприц снаряжен и осуществите осеменение в соответствии с инструкцией по ИО или рекомендацией предприятия-изготовителя семени.
- 3) После осеменения продезинфицируйте шприц.

Упаковка:

В футлярах поштучно.

Хранение:

Хранение осуществлять при комнатной температуре (свыше 0⁰C).

Срок годности:

Производителем не установлен.

Изготовитель:

CITO Products, Inc

По всем вопросам обращайтесь:

ООО «Континентал БиоТех» (142143, РФ, Московская обл., г. Подольск, п. Быково, 5-5)

E-mail: info@continentalbiotech.ru

Тел.: (495) 642-26-37, +7 (926) 519-49-53, +7 (929) 585-31-60