

**ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ ДО 42<sup>0</sup>С  
ВЛАГОЗАЩЕЩЕННЫЙ В ФУТЛЯРЕ  
BR-0803**



Термометр электронный до 42 °С влагозащитный в футляре используется для измерения температуры тела в прямой кишке животного при амбулаторном исследовании, в период клинических наблюдений или инфекционных болезней, так же для измерения температуры воды в оттаивателях.

Комплект термометра:

1. Термометр
2. Элемент питания (батарейка) в термометре
3. Инструкция
4. Защитный футляр


### Как измерять температуру

Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для включения. Раздастся звуковой сигнал, и на дисплее в течение двух секунд будут отображаться все сегменты. Потом термометр покажет тестовую температуру 36,5°С.

Если температура окружающей среды <32,00°С, ЖКД показывает «Lo °С», если температура >= 44,00°С, ЖКД показывает «Hi °С».

Когда на дисплее появится знак °С, термометр готов к использованию.

Для просмотра последнего измерения из памяти прибора, когда термометр выключен, нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в течение 2 секунд.

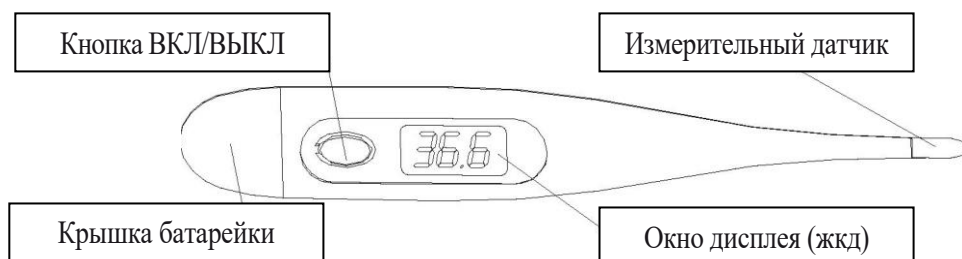

*Обращаем Ваше внимание, что звуковой сигнал не является сигналом для завершения измерения. Это означает, что Ваша температура повышается, но незначительно. Рекомендуем удерживать термометр после сигнала еще в течение 30-60 секунд.*

**По всем вопросам обращайтесь:**

ООО «Континентал БиоТех» (142143, РФ, Московская обл., г. Подольск, п. Быково, 5-5)

E-mail: [info@continentalbiotech.ru](mailto:info@continentalbiotech.ru)

Тел.: (495) 642-26-37, +7 (926) 519-49-53, +7 (929) 585-31-60

Если температура  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ , прибор издает короткие сигнальные гудки.

Когда температура  $< 37,5^{\circ}\text{C}$ , прибор издает длинные сигнальные гудки.

Для того чтобы увеличить жизненный цикл батареи, рекомендуется выключать прибор после его использования коротким нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. Если этого не последовало, то автоматическое отключение термометра происходит приблизительно через 10 минут.

### **Очистка и дезинфекция**

- 1 метод. Протрите тканью, смоченной в 70% изопропиловом спирте.
- 2 метод. Промойте теплой мыльной водой, затем протрите чистой влажной тканью и дайте высохнуть.
- 3 метод. Протрите влажной спиртосодержащей салфеткой (желательно салфеткой для инъекций).

### **Общие меры предосторожности**

Храните прибор в защитном футляре, когда не используете его.

### **Замена элемента питания (батарейки)**

Если значок «^» появляется в нижнем правом углу дисплея, то элемент питания в вашем цифровом термометре необходимо заменить. В данном термометре используется щелочной элемент питания типа LR41 или с окисью серебра SR41.

### **Для замены батарейки:**

Снимите крышку батарейки.

Замените батарейку.

Задвиньте крышку батарейки назад на место.

### **Примечание**

Точность прибора можно проверить самостоятельно. Для этого наполните сосуд (300-500 мл) теплой водой от  $36^{\circ}\text{C}$  до  $41^{\circ}\text{C}$ . Опустите в воду два или более термометров - испытуемые и эталонный, например ртутный. Чувствительные элементы термометров должны быть строго на одном уровне и утоплены в воду на 2-3 см. Через 1-2 минуты сравните показания термометров. Разница показаний температур не должна превышать  $0,1^{\circ}\text{C}$ .

### ***По всем вопросам обращайтесь:***

ООО «Континентал БиоТех» (142143, РФ, Московская обл., г. Подольск, п. Быково, 5-5)

E-mail: [info@continentalbiotech.ru](mailto:info@continentalbiotech.ru)

Тел.: (495) 642-26-37, +7 (926) 519-49-53, +7 (929) 585-31-60



**Гарантийный срок** эксплуатации термометра составляет 1 год и исчисляется с момента приобретения термометра.

Данная гарантия не распространяется на любые повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, а также на элементы питания и упаковку термометра. При обнаружении производственного дефекта в течение гарантийного срока неисправный термометр будет отремонтирован, а в случае невозможности ремонта заменен бесплатно.

Диапазон измерения 32,0°C-44,0°C

Погрешность +/-0,2°C

Шаг измерения 0,1 °C

Автоматическое выключение 10 мин ± 2 минуты

Элемент питания LR41 или SR41

Срок действия элемента питания Минимально 1 год

Размер 128,1x18,5x10,5 мм

Условия использования

Температура: 10°C ~ 40°C

Влажность: относительная влажность 30% ~ 85%

Условия хранения

Температура: -10°C ~ 60°C

Влажность: относительная влажность 25%~90%

***По всем вопросам обращайтесь:***

ООО «Континентал БиоТех» (142143, РФ, Московская обл., г. Подольск, п. Быково, 5-5)

E-mail: [info@continentalbiotech.ru](mailto:info@continentalbiotech.ru)

Тел.; (495) 642-26-37, +7 (926) 519-49-53, +7 (929) 585-31-60