

## Шприц для ИО ШО-3



Шприц для ИО ШО-3 предназначен для искусственного осеменения коров и телок визо- и ректоцервикальным способом.  
Изготовлен из нержавеющей стали.

- Универсальный: подходит для всех видов соломинок (пайеты) и чехлов для искусственного осеменения.
- Выполнен из нержавеющей стали, что дает возможность стерилизовать шприцы в автоклаве.
- Зажим на раскол плотно облегает чехол.

### **Меры предосторожности:**

Держите вне досягаемости детей. Не предназначен для инъекций.

### **Порядок применения:**

- а) Возьмите шприц в руку;
  - б) Выдвиньте плунжер на длину пайеты;
  - в) Вставьте в шприц поршнем во внутрь пайету с семенем быка, размороженным в соответствии с инструкцией по ИО или рекомендацией предприятия-изготовителя семени. Пайета должна быть обрезана со стороны запайки Цито-обрезчиком или другим предназначенным для обрезки пайет инструментом;
  - г) Наденьте до упора на шприц защитный чехол с голубой вставкой и зафиксируйте его;
  - д) При необходимости оденьте сверху санитарный чехольчик «Коверол»;
  - ж) Шприц снаряжен и осуществите осеменение в соответствии с инструкцией по ИО или рекомендацией предприятия-изготовителя семени.
- 3) После осеменения продезинфицируйте шприц.

### **Упаковка:**

В пакетах поштучно.

### **Меры предосторожности:**

Держите вне досягаемости детей. Не предназначен для инъекций.

### **Хранение:**

Хранение осуществлять при комнатной температуре (свыше 0<sup>0</sup>С).

### **Срок годности:**

Производителем не установлен.

### **Произведено:**

Россия

### ***По всем вопросам обращайтесь:***

ООО «Континентал БиоТех» (142143, РФ, Московская обл., г. Подольск, п. Быково, 5-5)

Е-mail: [info@continentalbiotech.ru](mailto:info@continentalbiotech.ru)

Тел.; (495) 642-26-37, +7 (926) 519-49-53, +7 (929) 585-31-60